
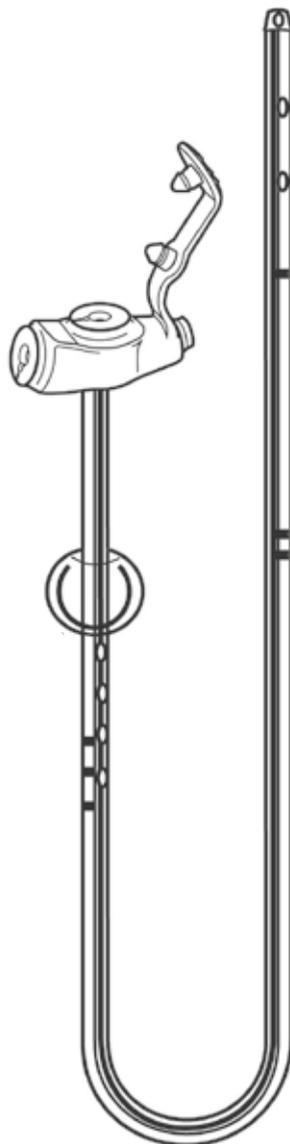


ΔVΔNOS


Sondes de gastro-jéjunostomie MIC-KEY®
Sondes de jéjunostomie MIC-KEY®

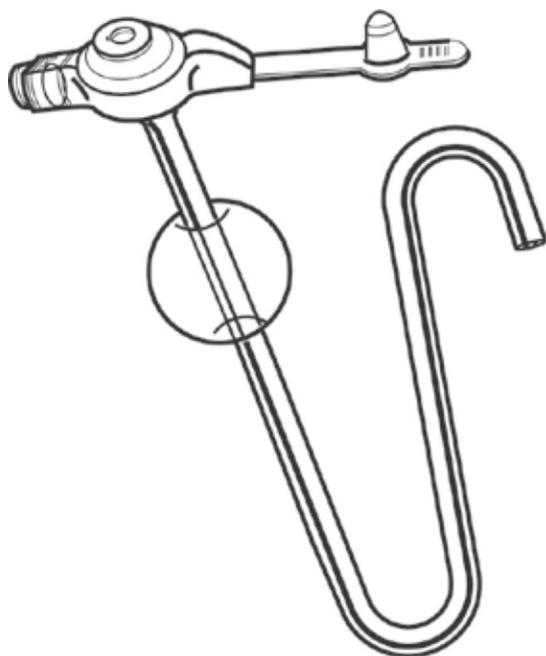

RÈGLES D'OR

SOINS QUOTIDIENS

- Lavez-vous toujours les mains à l'eau et au savon, puis séchez-les avant de manipuler la sonde.
- Inspectez le site de la stomie afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes de fuite, de rougeur ou d'irritation. Le cas échéant, contactez votre professionnel de santé.

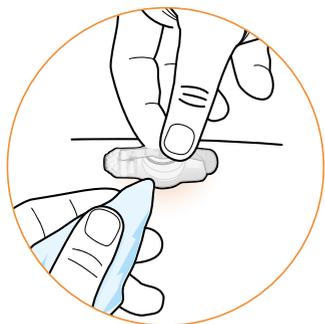

1

Nettoyez chaque jour la sonde et la peau autour de celle-ci, à l'aide de savon doux et d'eau, puis rincez et séchez soigneusement, selon les instructions de votre professionnel de santé.



2

Ouvrez le capuchon de la sonde et nettoyez avec soin l'extérieur du site d'accès jéjunal et gastrique, à l'aide d'un coton-tige. Retirez tous les résidus de formule de nutrition et de médicaments.

Les sondes de jéjunostomie MIC-KEY® ne possèdent qu'un seul site d'accès jéjunal.


- Veillez à ce que le renforcement du site de gonflage du ballonnet reste propre.
- Assurez-vous que votre sonde et votre stomie restent propres et sèches.
- N'utilisez pas de pansements sous la sonde de gastro-jéjunostomie/jéjunostomie MIC-KEY®, sauf s'ils sont cliniquement indiqués.



Ne faites pas tourner la sonde, car vous risqueriez de plier ou de la déloger.

TOUTES LES 2 SEMAINES

VÉRIFIEZ LE VOLUME D'EAU DANS LE BALLONNET TOUTES LES 2 SEMAINES

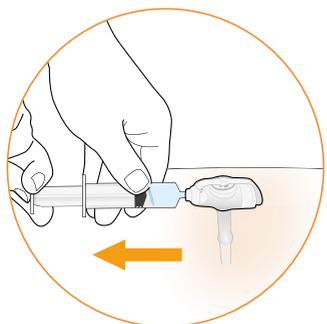

1

Connectez la seringue Luer-Slip au site d'accès du ballonnet et retirez toute l'eau, tout en laissant la sonde de nutrition en place.

Attention : si vous ne faites pas attention, une sonde à ballonnet peut facilement glisser dehors lors de la vérification du contenu du ballonnet (si l'enfant bouge soudainement ou tousse, p. ex.).



Ne remplissez jamais le ballonnet avec de l'air, une solution saline ou de la glycérine.

2

Vérifiez le volume et faites l'appoint jusqu'au volume prescrit à l'aide d'eau bouillie ou stérile froide.



Ne gonflez pas trop le ballonnet, car vous risqueriez de l'abîmer.


COMMENCEZ LA NUTRITION POST-PYLORIQUE

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT CORRECT DE LA SONDE

- 1 En cas de détresse respiratoire ou de vomissements, mesurez le pH de l'aspirat jéjunal selon les instructions de votre professionnel de santé. Le pH mesuré de l'aspirat jéjunal doit être de 6 à 8. Si le pH est inférieur à 5,5, la nutrition doit être arrêtée car la sonde peut avoir migré dans l'estomac.
- 2 Vérifiez si la distance entre la partie externe de la sonde et la peau est la même que la veille. Assurez-vous que la sonde n'est pas sortie de la stomie. Si c'est le cas, arrêtez immédiatement la nutrition entérale et consultez votre professionnel de santé.

ÉTAPE 2 : CONNECTEZ LE PROLONGATEUR MIC-KEY™

- 1 Utilisez exclusivement des prolongateurs de marque MIC-KEY™ sur votre sonde MIC-KEY™. Les prolongateurs d'autres marques peuvent notamment provoquer des fuites ou abîmer la valve anti-retour.
- 2 Connectez d'abord le prolongateur à la tubulure de nutrition entérale et remplissez le tube d'aliment afin d'éliminer l'air.

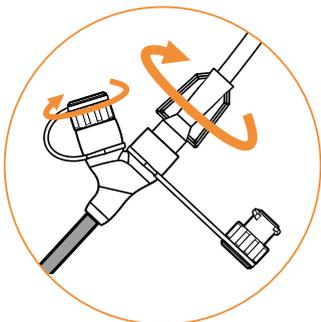

- 3 Ouvrez le capuchon de la sonde et fixez le prolongateur dans la sonde, en alignant les repères noirs du prolongateur et du site de nutrition jéjunale.



- 4 Poussez le prolongateur fermement vers le bas et « verrouillez-le » en tournant le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance (environ 3/4 de tour).




- 5 Ne tournez pas le connecteur au-delà de ce point.
- 6 Fermez la pince à roulette sur la tubulure de nutrition et la pince à ouverture rapide du prolongateur. Connectez la seringue ENFit® remplie d'eau au site d'administration de médicaments du prolongateur, ouvrez la pince à ouverture rapide et rincez la partie jéjunale de la sonde à l'aide de la quantité d'eau prescrite (généralement 10 à 25 ml).
- 7 Fermez la pince à ouverture rapide, déconnectez la seringue, fermez le capuchon du site d'administration de médicaments et rouvrez la pince à roulette ainsi que la pince à ouverture rapide.
- 8 Commencez l'administration de la nutrition entérale selon les recommandations de votre diététicien ou de votre professionnel de santé.
- 9 Afin d'éviter toute obstruction, utilisez une pompe de nutrition pour délivrer la nutrition entérale et rincez le site jéjunal de la sonde toutes les 6 heures à l'aide de 10 à 25 ml d'eau.


ÉTAPE 3 : DÉCONNEXION DU PROLONGATEUR MIC-KEY[®]

Il est recommandé de déconnecter le prolongateur de la sonde MIC-KEY[®] après la nutrition.
Procédez comme suit :

- 1** Arrêtez l'administration de la nutrition entérale, fermez la pince à roulette et la pince à ouverture rapide, puis déconnectez la tubulure du prolongateur.

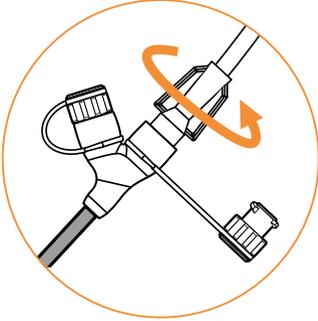

- 2** À l'aide de votre seringue ENFit[®], ouvrez la pince à ouverture rapide, puis rincez le prolongateur à l'aide du volume de rinçage recommandé (généralement 10 à 20 ml).

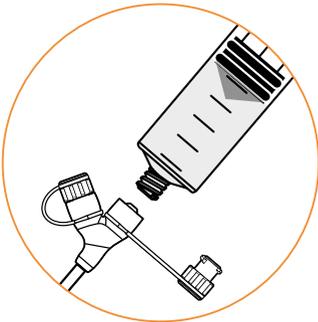

- 3** Déconnectez le prolongateur du site jéjunal de la sonde, en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère noir du site de nutrition soit aligné avec le repère noir du prolongateur.



- 4** Retirez délicatement le prolongateur et remplacez le capuchon sur la sonde MIC-KEY[®].



ENTRETIEN ET RANGEMENT DU PROLONGATEUR MIC-KEY*

- Lavez le prolongateur à l'eau chaude et savonneuse immédiatement après chaque usage.
- Rincez-le soigneusement et rangez-le dans un endroit propre et sec.
- Pour des raisons d'hygiène et de fonctionnalité, ce prolongateur doit être remplacé au moins une fois toutes les deux semaines.



DÉCOMPRESSION GASTRIQUE CONSEILS ET ASTUCES

- La sonde de gastro-jéjunostomie MIC-KEY* permet de réaliser simultanément la décompression gastrique et la nutrition entérale.
- Connectez le prolongateur MIC-KEY* de nutrition par bolus au site d'accès gastrique afin de drainer l'excédent de liquide ou de gaz gastrique de l'estomac. Cette opération peut avoir lieu par aspiration active à l'aide d'une grande seringue ou par gravité à l'aide d'une poche de drainage connectée.
- N'utilisez pas une aspiration continue ou fortement intermittente car cela pourrait blesser le tissu gastrique.
- Remplacez le prolongateur MIC-KEY* au moins toutes les deux semaines.



N'essayez pas d'aspirer ni de mesurer le liquide ou le contenu à partir du site jéjunal. Ne connectez jamais le site jéjunal à un système d'aspiration active.

- Avant de démarrer la nutrition entérale, vérifiez le positionnement correct de la sonde à l'aide des méthodes recommandées par votre professionnel de santé.
- En cas de détresse respiratoire ou de vomissements, arrêtez la nutrition et mesurez le pH de l'aspirat jéjunal.
- Si votre sonde sort accidentellement de la peau, arrêtez la nutrition. Fixez la sonde sur la peau à l'aide de ruban adhésif et contactez immédiatement votre professionnel de santé.
- Si vous décompressez l'estomac pendant la nutrition (impossible avec la sonde de jéjunostomie MIC-KEY*) et que vous constatez la présence de formule de nutrition dans le drainage gastrique, arrêtez la nutrition et prévenez votre professionnel de santé.
- N'utilisez pas de pansements sous la sonde MIC-KEY*.
- Rincez la sonde par le site jéjunal à l'aide de la quantité d'eau recommandée, avant et après la nutrition et au moins toutes les 6 heures.
- Ne gonflez pas trop le ballonnet.
- Votre professionnel de santé vous aidera à déterminer le moment où il est nécessaire de remplacer votre sonde MIC-KEY*. Il n'y a pas de fréquence de remplacement recommandée, car ce type de sonde doit être remplacé en milieu hospitalier, au service d'endoscopie ou de radiologie.

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS

La plupart des médicaments doivent être administrés dans l'estomac, par le site gastrique de la sonde. Cependant, la sonde de jéjunostomie MIC-KEY® ne permet pas d'accéder à l'estomac et certains patients équipés d'une sonde de gastro-jéjunostomie MIC-KEY® ne tolèrent pas les médicaments administrés dans l'estomac. Il est donc recommandé de vérifier auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si l'administration du médicament par le site jéjunal est autorisée.

Procédez comme suit pour administrer les médicaments :

- Remplissez la seringue ENFit® d'eau, puis connectez-la au prolongateur et remplissez celui-ci complètement d'eau. Connectez le prolongateur au site gastrique ou jéjunal recommandé de la sonde de nutrition. Rincez la sonde à l'aide de 10 à 20 ml d'eau. Fermez la pince d'ouverture rapide sur le prolongateur, déconnectez la seringue et videz-la.
- Écrasez le médicament (comprimés ou gélules) et mélangez-le à de l'eau tiède ou selon les instructions de votre pharmacien.
- Aspirez le contenu dans la seringue ENFit®. Connectez le prolongateur, ouvrez la pince à ouverture rapide et injectez le contenu dans la sonde.
- Refermez la pince, déconnectez la seringue, remplissez la seringue d'eau et rincez à nouveau.
- Déconnectez le prolongateur et fermez le capuchon. Nettoyez le prolongateur comme décrit précédemment.
- En cas d'administration du médicament directement dans l'estomac, il est recommandé de ne pas drainer ni aspirer le contenu gastrique pendant 20 à 30 minutes. Veuillez vérifier auprès de votre professionnel de santé.

CONSEILS ET ASTUCES

Les obstructions de la sonde sont généralement dues à l'administration de médicaments ou d'aliments. Par conséquent, il est important :

- De rincer la sonde avant et après l'administration de médicaments ou d'aliments.
- Ne mélangez jamais plusieurs médicaments. Administrez-les toujours l'un à la suite de l'autre, après avoir rincé la sonde à l'aide d'eau.
- N'ajoutez jamais de médicaments dans la formule de nutrition ni dans un aliment que vous avez mixé vous-même.

En cas de question :

Infirmier/ère en appui
nutritionnel de l'hôpital :

Tél.:

Organisation de soins
à domicile :

Tél.:

Infirmier/ère à domicile :

Tél.:

Diététicien/ne :

Tél.:

Remarque importante : les consignes ci-dessus ne sont que des recommandations pour une bonne prise en charge de la sonde. Elles ne doivent être respectées que si le médecin qui met la sonde en place ou votre hôpital local ne vous donne aucune autre instruction. Les directives d'Avanos ne remplacent en aucun cas les directives des médecins ou des infirmières locaux. La responsabilité finale du traitement doit revenir au médecin qui met la sonde en place. Tout dispositif médical comporte des risques inhérents. Pour connaître les indications, mises en garde, avertissements et contre-indications, veuillez consulter la notice du produit.

AVANOS
alimentationparsonde.fr

Pour en savoir plus, veuillez envoyer un courriel à
serviceclients@avanos.com